

Urinal® D-Max

Медицинско изделие СЕ 0481



- За предотвратяване на повтарящи се цистити, причинени от *E.coli*
- При лечение на цистит

Общи препоръки

Прочетете внимателно инструкцията преди употреба на Urinal® D-Max дори, ако и преди сте използвали това медицинско изделие. Възможно е информацията в нея да е актуализирана съобразно нови изследвания и открития, откакто последно сте употребявали продукта. Независимо от това, Urinal® D-Max трябва да се използва много внимателно, за да постигнете добър резултат. Запазете тази инструкция за употреба; може да се наложи да я прочетете отново.

Приложение

Urinal® D-Max е предназначен да подпомага лечението на уринарни инфекции в пикочния мехур и предотвратяването на повтарящи се уринарни инфекции (инфекции на пикочния мехур или цистит), причинени от *E.coli*. Циститът е възпаление на пикочния мехур, обикновено предизвикано от бактериална инфекция в него. Бактериална инфекция на пикочните пътища или пикочния мехур обикновено възниква, когато бактерии от чревния тракт достигат пикочните пътища през уретрата. Веднъж попаднали там, те се прикрепят към стените на пикочния мехур или на други части от уринарния тракт и причиняват възпаление. Уринарните инфекции, причинени от *E. coli*, могат да доведат до един или повече от следните симптоми (но не винаги):

- усещане за парене или болезнено уриниране;
- неотложни позиви за уриниране;
- чести позиви за уриниране;
- болка в корема.

Дозировка и приложение

За възрастни и деца над 18 години:

- за предотвратяване на повторна поява на цистит:
1 ефервесцентна таблетка веднъж дневно. Разтворете ефервесцентната таблетка в чаша вода (200 ml) и разбъркайте. Изпийте веднага. За перорално приложение.
- за подпомагане на лечението:
1 ефервесцентна таблетка два пъти дневно. Разтворете ефервесцентната таблетка в чаша вода (200 ml) и разбъркайте. Изпийте веднага. За перорално приложение. Не превишавайте дневната доза.

Продължителност на употреба

Не използвайте Urinal® D-Max за повече от 30 дни в 1 лечебен курс. Лечението може да се възобнови след 4 дни пауза.

Как действа

Активната съставка D-маноза присъства естествено в човешкия метаболизъм. При навлизане в пикочните пътища, D-манозата блокира бактериите *E. coli* и предотвратява тяхното закрепване към стените им. Вече свободно плаващи, бактериите могат лесно да бъдат елиминирани с потока на урината.

Странични ефекти:

Urinal® D-Max рядко предизвиква странични ефекти и като цяло се понася добре. Възможни нежелани реакции са стомашно-чревни симптоми като диария, стомашни болки, метеоризъм (газове).

Употреба при бременност и/или кърмене:

Няма налични данни за употребата на Urinal® D-Max по време на бременност или кърмене, следователно не препоръчваме употребата на този продукт по време на бременност или кърмене.



Предпазни мерки:

- не използвайте при алергия към някоя от съставките;
- при предозиране могат да възникнат неблагоприятни ефекти като метеоризъм (газове), стомашни болки или диария;
- пазете на място недостъпно за малки деца;
- ако получите алергична реакция, спрете употребата на Urinal® D-Max.
- продуктът може да причини беетурия (червено/розово обезцветяване на урината) поради наличието на помощното вещество екстракт от червено цвекло.

Консултирайте се с лекар, ако:

- установите следи от кръв в урината;
- симптомите се влошават или продължават повече от 7 дни;
- имате съпътстващи здравословни проблеми или приемате други лекарства;
- имате следните симптоми на инфекция на пикочния мехур или горните пикочни пътища: температура от 38°C (100,4°F) или по-висока, неконтролируемо треперене, гадене (прилошаване), повръщане или диария. В този случай е възможно да страдате от инфекция на горните пикочни пътища, която се нуждае от допълнително лечение;
- имате анамнеза за камъни в бъбреците.

Състав:

Лимонена киселина, D-маноза, натриев хидроген карбонат, царевично нишесте, цвекло на прах, сорбитол, екстракт от горски плодове, инулин, сукралоза.

Всяка ефервесцентна таблетка съдържа 2g D-маноза. Не съдържа алергени и е подходящ за вегани.

Съдържание: 14 ефервесцентни таблетки



Инструкции за съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка при стайна температура (5-25 °C) на сухо и тъмно място и място недостъпно за малки деца.



Срок на годност

Не използвайте Urinal® D-Max след датата указана на опаковката: след „не използвай след“.

Медицинско изделие

Urinal® D-Max е медицинско изделие клас IIa според Европейската Директива за медицински изделия 93/42/ЕЕС.

Последна дата на преглед на тези инструкции:

ноември 2022 • 13-03181-v1.3



PK Benelux BV
Luchttoord 17, 5406 XP Uden, Нидерландия

Дистрибутор:

СТАДА България ЕООД, 1407 София, ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу Плаза, ет. 5, тел. 920 90 65, www.stada.bg

CE 0481

6032/L1/BUL

STADA